

可動・補助器具

Mアーム

滅菌済み(EOG)



[品番] MC01001
[規格] 1本/袋(滅菌済み)
[入数] 10本/箱(最小販売単位)
[全長] 40cm
[クリップ部最大開口]
(大)3cm/(小)1cm
[JAN] 4571149110272
[滅菌日] パッケージラベルに印字
[滅菌期限] 滅菌日より3年

●使用方法

1. 滅菌包装から本品を取り出します。
2. 片方のクリップを使用する機器に取り付けます。
3. もう一方のクリップを稼働させたい器具・器械に取り付けます。
※取り付けの際にクリップ最大開口サイズをご確認ください。
※最大開口サイズを超えて無理に取り付けを行なうと破損の恐れがあります。
4. アームはフレキシブルに稼働しますので目的に応じ、任意の位置に移動してご使用してください。
5. 滅菌済みですので使用後は廃棄し、再使用しないでください。

① 注意

再滅菌・分解・組立不可

- ① 本製品は Disposable のため繰り返し使用できません。
- ② 本製品は内視鏡を保持する目的に使用できません。
- ③ 本製品は処置具等を任意の位置に可動・補助するもので、意図する位置に保持・調整するものではありません。
- ④ 本製品はプラスチック素材です。突起部で手袋を傷つけたり、強い力を加えると壊れたり、破損部でけがをする恐れがありますので取り扱いには十分ご注意ください。

※印刷の特性上、製品の色合いが異なる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

医療現場の要望に応え誕生した可動・補助器具「Mアーム」。利便性を高めることに重点を置き、最適な形状、クリップサイズ、全長など実際に使用される方々の声を反映し、作り上げました。

特長 1

Product Features

f-TUL時に、処置具を任意の位置に可動

f-TULの手技時に、処置具を任意の位置に可動できます。



特長 2

Product Features

1本ずつ滅菌包装(EOG)

滅菌処理を施しているため、清潔操作が可能です。清潔領域をはじめとしたあらゆるシーンでお使いいただけます。

特長 3

Product Features

傷から守る保護パット付き

器具・器械が傷つかないように、クリップ部の内側に保護パットを貼付しています。



エム・シー・メディカル株式会社
〒160-8355 東京都新宿区西新宿7-5-25
<http://www.mcmed.co.jp>

【北日本営業所】	TEL.022-215-3390	FAX.022-215-3399
【東京支店】	TEL.03-5330-7860	FAX.03-5330-7867
【名古屋支店】	TEL.052-962-7855	FAX.052-962-1571
【大阪支店】	TEL.06-6271-7855	FAX.06-6271-1012
【九州支店】	TEL.092-476-0833	FAX.092-476-0832