



i-gel^{O₂} Resus Pack

i-gel O₂ レサシパック

○



Four things in one pack, one less thing to think about



i-gel O₂ レサシパック

救命救急領域における気道確保については、使用に際して簡便で、迅速かつ信頼性の高いデバイスが求められます。この i-gel O₂ レサシパックにおいては挿入に必要な、i-gel O₂ 本体、水溶性潤滑剤、固定用ストラップ、吸引チューブがワンパッケージとなっており、開封後すぐにご使用いただけます。



i-gel and natural airway management

インターサージカル i-gel は、独自のディスプレイサブル気道確保デバイスです。長年にわたる豊富な研究開発の集大成で、65体もの解剖体を用いて喉頭周囲の解剖学的構造を写し出した形状を実現しております。

The non-inflatable cuff

インターサージカル i-gel におけるこの革新的なコンセプトと形状は、従来の膨張させるカフ構造を必要としないことを意味し、また柔軟性に富んだ材質の採用によって画期的なフィット性を作り出し、その結果組織への圧迫や外傷を有意に排除・低減することが出来ます。

The simple, safe and rapid solution

挿入時の手技においては、カフを脱気して膨らまずような従来の手技を必要としないため、迅速な挿入が可能です。また患者口腔内に指を入れる必要が無いため、シンプルで安全にご使用いただけます。

Fixation

i-gel O₂ レサシパックは、これまでのインターサージカル i-gel の性能をそのままに、ストラップでの固定用フックや酸素ポートという機能を追加しております。

A supplementary oxygen port

i-gel O₂ は、ヨーロッパ蘇生協議会 (ERC) やアメリカ心臓協会 (AHA) により示された標準蘇生プロトコルの一部として、換気を容易にするように設計されています。

i-gel O₂ は、補助的な酸素ポートが組み込まれているため、CardioCerebral Resuscitation (CCR) のプロトコルの一部として passive oxygenation や Passive Airway Management (PAM™) として使用することが出来ます。



Features and benefits

15mm コネクタ

ドレイン (胃管)

フックリング

サイズ、適用患者の体重(目安)

ポジションガイド (切歯線)

ラテックスフリー



酸素ポート

CardioCerebral Resuscitation (CCR) の一部として passive oxygenation の投与のために。 ※蘇生バッグ (BVM) や人工呼吸器等を接続した強制換気と酸素ポートからの酸素投与を同時に行わないで下さい。

内蔵されたバイトブロック

肉厚で幅の広いチューブ
容易な挿入を補助し、捻じれや回転のリスクを軽減します。

i-gel O₂ レサシパック構成内容

ストラップ (固定用)



i-gel O₂ 本体

吸引チューブ12Fr

水溶性潤滑剤5g
(滅菌済み)

喉頭蓋レスト

喉頭蓋をおさえることで気道閉塞を予防します。

非膨張性カフ

ドレイン (遠位端)


i-gel のサイズ

気管内チューブ 対応サイズ

サイズ③ 最大6.0mm

サイズ④ 最大7.0mm

サイズ⑤ 最大8.0mm

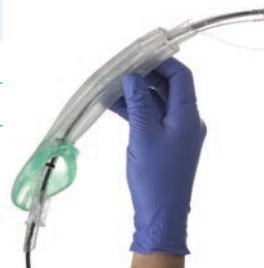

Innovative packaging

i-gel O₂ レサシパックの専用ケースは、サイズごとにカラーコードによって色分けされ、視覚的なサイズ選択を容易にしております。また解剖学的形状を保護する役割があります。



Ordering information

| カタログ番号 | 製品名 | 包装単位 | カラーコード | 適用患者の体重 (目安) |
|---------|----------------------------------|------|--------|--------------|
| 8703000 | i-gel O ₂ レサシパック サイズ3 | 6 | ● | 30~60kg |
| 8704000 | i-gel O ₂ レサシパック サイズ4 | 6 | ● | 50~90kg |
| 8705000 | i-gel O ₂ レサシパック サイズ5 | 6 | ● | 90kg超 |

販売名: インターサージカル i-gel 医療機器認証番号: 22200BZX00120000

Related products

インターサージカル i-gel

| カタログ番号 | 製品名 | 包装単位 | カラーコード | 適用患者の体重 (目安) |
|---------|--------------|------|--------|--------------|
| 8201000 | i-gel サイズ1 | 5 | ● | 2~ 5kg |
| 8215000 | i-gel サイズ1.5 | 5 | ● | 5~12kg |
| 8202000 | i-gel サイズ2 | 5 | ● | 10~25kg |
| 8225000 | i-gel サイズ2.5 | 5 | ○ | 25~35kg |
| 8203000 | i-gel サイズ3 | 5 | ● | 30~60kg |
| 8204000 | i-gel サイズ4 | 5 | ● | 50~90kg |
| 8205000 | i-gel サイズ5 | 5 | ● | 90kg超 |

販売名: インターサージカル i-gel 医療機器認証番号: 22200BZX00120000



水溶性潤滑剤

| カタログ番号 | 製品名 | 包装単位 | 備考 |
|---------|-----------|------|------|
| 5469000 | 水溶性潤滑剤 5g | 150 | 滅菌済み |

本品は雑品です。



一回分が個別包装になった水溶性潤滑剤です。使い切りのため清潔にご使用いただけます。

※インターサージカル i-gel 及び i-gel O₂ レサシパックは、滅菌済みのディスポーザブル製品です。

※再滅菌・再使用は行わないで下さい。

※使用される患者の標準体重を基に、「適用患者の体重 (目安)」を考慮してサイズ選択することを推奨します。

製造元



製造販売元



札幌 ☎ 011-622-4361 仙台 ☎ 022-299-2371
 関東 ☎ 048-642-3360 東京 ☎ 03-5665-2780
 名古屋 ☎ 052-242-5201 大阪 ☎ 06-6222-1851
 広島 ☎ 082-270-3071 福岡 ☎ 092-622-7730

●改良のため予告なく仕様を変更することがあります。
 作成日: 2018年3月第1版
 2018.3.5000