




 **i-gel**<sup>®</sup>

インターサージカル i-gel



## Airway management has evolved

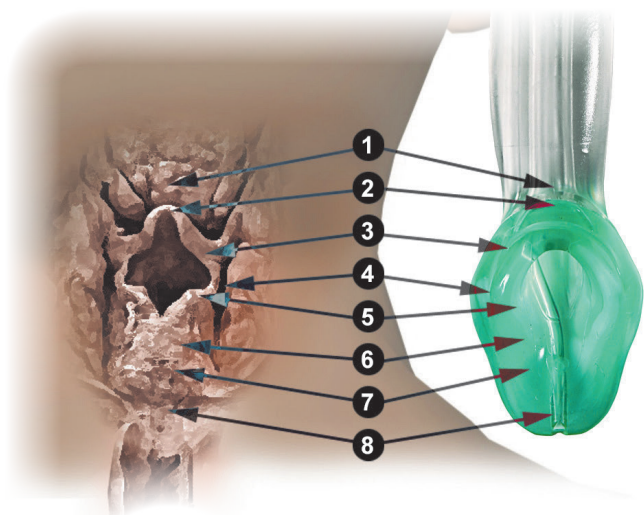

- ①舌根    ②喉頭蓋    ③被裂喉頭蓋襞    ④梨状陥凹
- ⑤喉頭外部の軟骨    ⑥甲状軟骨    ⑦輪状軟骨
- ⑧上部食道開口部

### i-gel and natural airway management

インターサージカル i-gel は、独創的なディスプレイサブル気道確保デバイスです。長年にわたる豊富な研究開発の集大成で、65体もの解剖体を用いて喉頭周囲の解剖学的構造を写し出した形状を実現しております。

### The non-inflatable cuff

インターサージカル i-gel におけるこの革新的なコンセプトと形状は、従来の膨張させるカフ構造を必要としないことを意味し、また柔軟性に富んだ材質の採用によって画期的なフィット性を作り出し、その結果組織への圧迫や外傷を有意に排除・低減することが出来ます。

### The simple, safe and rapid solution


挿入時の手技においては、カフを脱気して膨らますような従来の手技を必要としないため、シンプルで安全に、かつ迅速な挿入を提供いたします。

### A wide range of use

インターサージカル i-gel は、全身麻酔時の気道確保、挿管困難症例時の気道確保、気管支ファイバースコープを使用した挿管の補助具まで幅広くご使用いただけます。さらには人工呼吸使用時や、救命救急時における気道確保デバイスとしてもご使用いただけます。

### Second generation

インターサージカル i-gel は、内蔵バイトブロックと胃管ラインを備え、また高いフィット性を実現した第二世代の声門上デバイスです。NAP4 (4<sup>th</sup> National Audit Project of The Royal College of Anaesthetists and The Difficult Airway Society) においても、第二世代の声門上デバイスの使用が推奨されております。

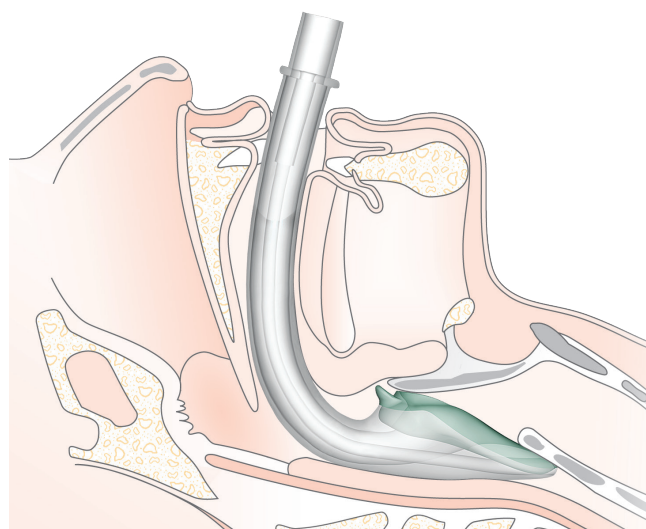



## Features and benefits

i-gel のサイズ	胃管カテーテル 対応サイズ
サイズ①	(使用できません)
サイズ①.5	最大10Fr
サイズ②	最大12Fr
サイズ②.5	最大12Fr
サイズ③	最大12Fr
サイズ④	最大12Fr
サイズ⑤	最大14Fr



15mm コネクタ

サイズ、適用患者の体重 (目安)

ポジションガイド (切歯線)

(サイズ3、4、5のみ)

ラテックスフリー



ドレイン (胃管)

内蔵されたバイトブロック

肉厚で幅の広いチューブ  
容易な挿入を補助し、捻じれや  
回転のリスクを軽減します。

喉頭蓋レスト

喉頭蓋をおさえることで  
気道閉塞を予防します。

非膨張性カフ

ドレイン (遠位端)



i-gel のサイズ








気管チューブ 対応サイズ

サイズ①	最大3.0mm
サイズ①.5	最大4.0mm
サイズ②	最大5.0mm
サイズ②.5	最大5.0mm
サイズ③	最大6.0mm
サイズ④	最大7.0mm
サイズ⑤	最大8.0mm

## Innovative packaging

インターサージカル i-gel の専用ケースは、サイズごとにカラーコードによって色分けされ、視覚的なサイズ選択を容易にしております。また解剖学的形状を保護する役割があります。

## Ordering information

カタログ番号	製品名	包装単位	カラーコード	適用患者の体重 (目安)
8201000	i-gel サイズ1	5入		2~ 5kg
8215000	i-gel サイズ1.5	5入		5~12kg
8202000	i-gel サイズ2	5入		10~25kg
8225000	i-gel サイズ2.5	5入		25~35kg
8203000	i-gel サイズ3	5入		30~60kg
8204000	i-gel サイズ4	5入		50~90kg
8205000	i-gel サイズ5	5入		90kg超

販売名: インターサージカル i-gel 医療機器認証番号: 22200BZX00120000

## Related products

### i-gel O<sub>2</sub> レサシパック

カタログ番号	製品名	包装単位	カラーコード	適用患者の体重(目安)
8703000	i-gel O <sub>2</sub> レサシパック サイズ3	6入		30~60kg
8704000	i-gel O <sub>2</sub> レサシパック サイズ4	6入		50~90kg
8705000	i-gel O <sub>2</sub> レサシパック サイズ5	6入		90kg超

販売名: インターサージカル i-gel 医療機器認証番号: 22200BZX00120000

i-gel O<sub>2</sub> レサシパックにおいては挿入に必要な、i-gel O<sub>2</sub>本体、水溶性潤滑剤、固定用ストラップ、吸引チューブがワンパッケージとなっており、開封後すぐにご使用いただけます。



## 水溶性潤滑剤

カタログ番号	製品名	包装単位	備考
5469000	水溶性潤滑剤 5g	150入	滅菌済み

一回分が個別包装になった水溶性潤滑剤です。使い切りのため清潔にご使用いただけます。

本品は雑品です。



※インターサージカル i-gel 及び i-gel O<sub>2</sub> レサシパックは、滅菌済みのディスポーザブル製品です。

※再滅菌・再使用は行わないで下さい。

※使用される患者の標準体重を基に、「適用患者の体重 (目安)」を考慮してサイズ選択することを推奨します。

製造元



製造販売元



(01)04540913111586

札幌 ☎ 011-622-4361 仙台 ☎ 022-299-2371  
 関東 ☎ 048-642-3360 東京 ☎ 03-5665-2780  
 名古屋 ☎ 052-242-5201 大阪 ☎ 06-6222-1851  
 広島 ☎ 082-270-3071 福岡 ☎ 092-622-7730

●改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

作成日: 2018年3月第1版

2018.3.7000